


Bittium OmegaSnap™ 3-CH ECG Electrode

Kolmekanavainen Bittium OmegaSnap™ EKG-elektrodi on tarkoitettu käytettäväksi Bittium Faros™ 360 -laitteen kanssa EKG-signaalin mittaamiseksi.

Tarvikkeet

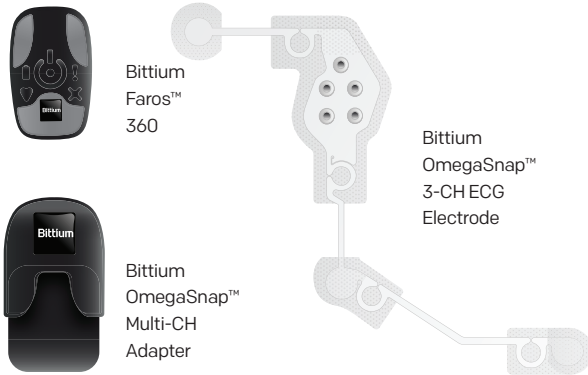

Huomioitavaa

- Elektrodi tulee laittaa vahingoittumattomalle, puhtaalle iholle.
- Älä käytä kosteusvoiteita tai kosmeettikat tuotteita elektrodin ihoalueella ennen elektrodin kiinnittämistä.
- Älä käytä vanhentuneita elektrodeja. Tarkista päiväys pakkauksesta.
- Elektrodi on kertakäyttöinen. Uudelleenkäyttö voi johtaa esim. infektiin.
- Irrota elektrodi ja lopeta laitteen käyttö, jos ne aiheuttavat ihoärsytystä. Ongelmatilanteissa ota yhteys hoitavaan lääkäriin tai sairaanhoitajaan.
- Elektrodi tulee vaihtaa, jos se ei pysy iholla.
- Poista elektrodi iholta mittauksen jälkeen.
- Elektrodia tulee käyttää vain Bittium Faros -laitteen kanssa.
- Faros-laite ja OmegaSnap-adapteri tulee puhdistaa käytön jälkeen. Suositeltu puhdistustapa: alkoholittomat puhdistus- ja desinfiointiliinat lääketieteellisille laitteille (esimerkiksi mikrozyd® tai SaniCloth AF3).
- Seuraa näitä käyttöohjeita. Lisätietoa Faros-laitteen ohjeessa.

Bittium



Bittium Biosignals Oy
Pioneerinkatu 6
70800 Kuopio, FINLAND




Puh: +358 (0)40 3442000
sähköposti: bbs@bittium.com tai
medical.support@bittium.com


www.bittium.com

Bittium OmegaSnap™ 3-CH ECG Electrode

Pikaohje

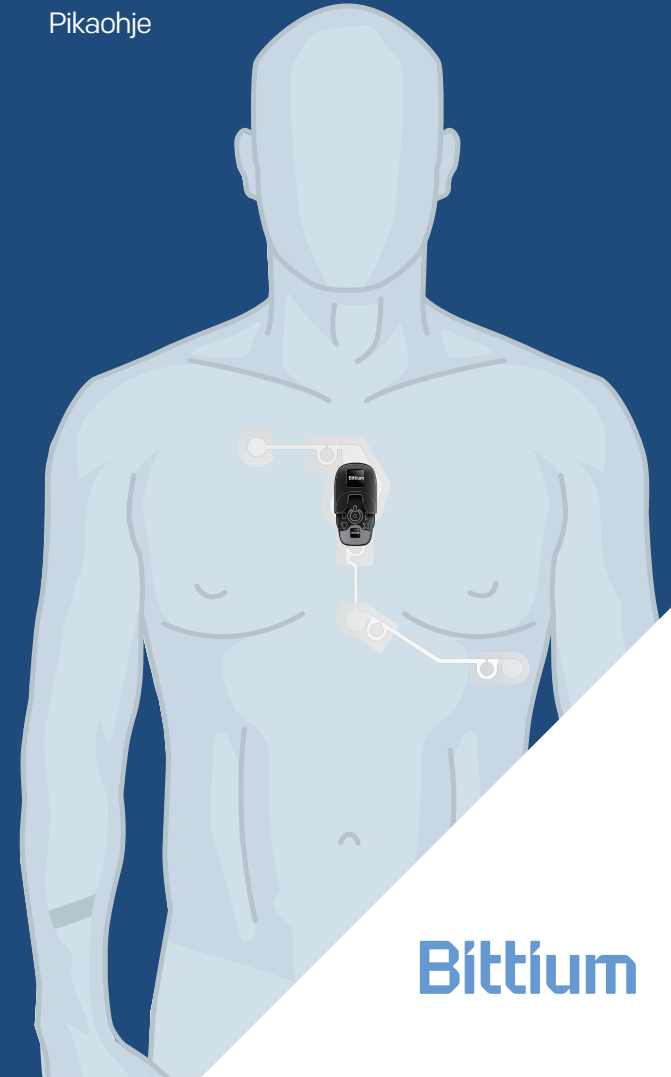




Bittium

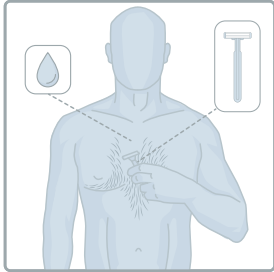

1.

Poista ihokarvat tarvittaessa. Puhdista iho hoitavan lääkärin tai klinikan ohjeiden mukaan. Ihon tulee olla puhdas ja kuiva ennen elektrodin kiinnittämistä.


2. Varmista, että elektrodipakkaus on avaamaton ja päiväys on voimassa. Avaa pussi ja ota elektrodi ulos.

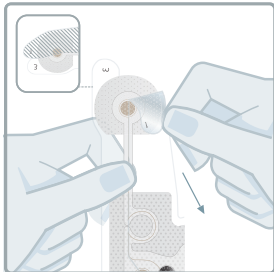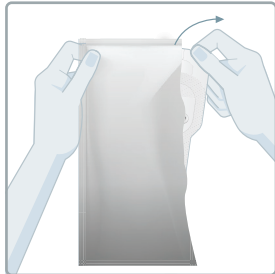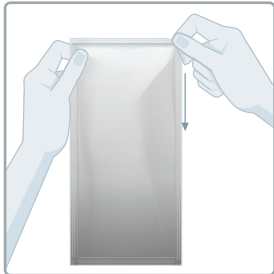



3.

Irrota tarrapinnan suojakalvo (numero 1). Älä koske tarrapintaan.

4. Kiinnitä elektrodi iholle. Elektrodin yläreuna tulee noin kahden sormen leveyden verran kaulakuopan alapuolelle. Elektrodin ylähaara tulee sijaita oikean solisluun alapuolella. Älä vielä poista suojakalvoja numero 2 tai 3.


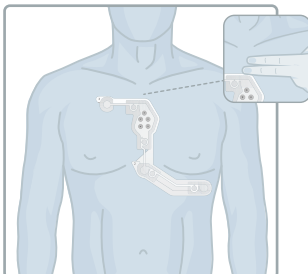


5. Kun elektrodin ensimmäinen osa on hyvin kiinnitetty, poista toinen suojakalvo (numero 2) vetämällä sivulle ja varmista samalla, että elektrodi kiinnittyy ihoon. Poista suojakalvo numero 3 ja kiinnitä loput elektrodista ihoon.

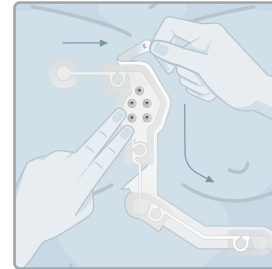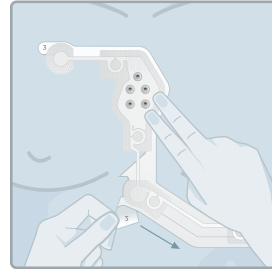


6.

Varmista, ettei Faros-laitteessa ja OmegaSnap-adapterissa ole vaurioita*. Yhdistä Faros-laite adapteriin. Kiinnitä adapteri elektrodiin. Paina adapteria elektrodia vasten varmistaaksesi, että kaikki nepparit ovat kiinnitettyinä.

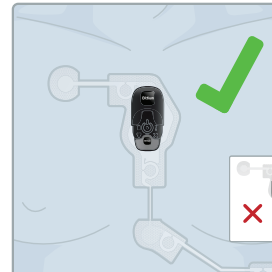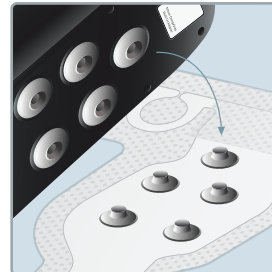


7.

Paina ja vapauta virtanappi aloittaaksesi mittauksen. Merkkiääni ja vilkkuva vihreä valo tarkoittavat, että mittaus on alkanut.


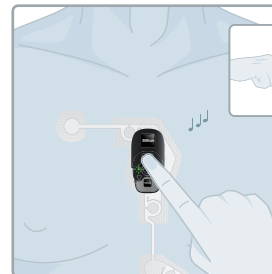


8.

Kun haluat lopettaa mittauksen paina virtanappia noin 8 sekunnin ajan, kunnes kuulet kolme piippausta ja vilkkuva merkkivalo sammuu.

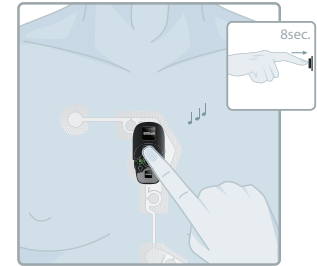

9. Irrota laite ja adapteri elektrodista. Irrota elektrodi ihosta ottamalla kiinni tarrapinnan reunasta ja vetämällä varovasti alaspäin kunnes koko elektrodi on irti. Käytä tarvittaessa saippuavettä apuna. Hävitä elektrodi käytön jälkeen. Palauta Faros-laite ja adapteri hoitavalle lääkärille tai klinikalle.

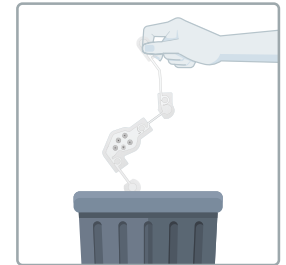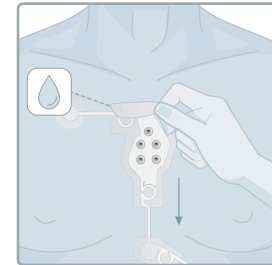

Symbolit

CE CE-merkki

⊗ Kertakäyttöinen

📅 Valmistuspäivä

LOT Eräkoodi

🏭 Valmistaja

🕒 Viimeinen käyttöpäivä

📖 Seuraa käyttöohjetta

MD Lääkinnällinen laite