

# Bittium OmegaSnap™ 2-CH ECG Electrode

Bittium OmegaSnap™ EKG-elektrod med två kanaler är avsedd att användas med enheten Bittium Faros™ 360 för att mäta EKG-signaler.


## Tillbehör



Bittium  
Faros™  
360



Bittium  
OmegaSnap™  
Multi-CH  
Adapter

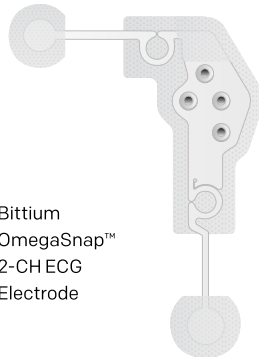

Bittium  
OmegaSnap™  
2-CH ECG  
Electrode

## Observera

Elektroden ska appliceras på frisk och ren hud.

Använd inte fuktighetskrämer eller kosmetikprodukter på hudområdet där du fäster elektroden.

Använd inte gamla elektroder. Kontrollera datumet på förpackningen.

Elektroden är avsedd för engångsbruk. Återanvändning skulle exempelvis kunna leda till infektion.

Ta bort elektroden om den förorsakar hudirritation. Vid problem kontakta behandlande läkare eller sjuksköterska.

Elektroden måste bytas ut om den lossnar från på huden.

Ta bort elektroden efter mätningen.

Elektroden ska bara användas tillsammans med Bittium Faros-enheten.

Faros-enheten och OmegaSnap-adaptorn ska rengöras efter användning. Rekommenderat rengöringssätt: alkoholfria rengörings- och desinfektionsdukar för medicinska produkter (till exempel mikrozid® eller SaniCloth AF3).

Var god följ dessa bruksanvisningar. Mer information finner man i manualen för Faros-enheten.

# Bittium



Bittium Biosignals Oy  
Pioneerinkatu 6  
70800 Kuopio, FINLAND




Tel: +358 (0)40 3442000  
e-post: bbs@bittium.com tai  
medical.support@bittium.com

[www.bittium.com](http://www.bittium.com)


Copyright © 2024-09-27 Bittium. Alla rättigheter förbehålls. Dokumentbeteckning: P0000021701

# Bittium OmegaSnap™ 2-CH ECG Electrode

Snabbguide

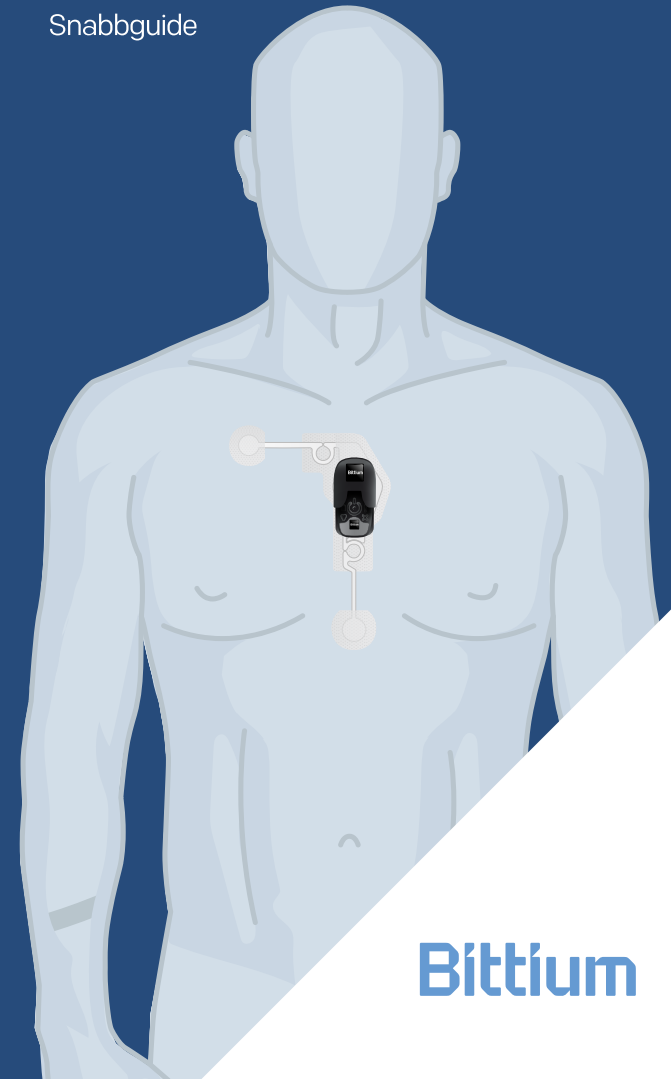


# Bittium

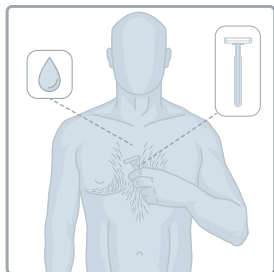

1.

Ta bort kroppsbehåring vid behov. Tvätta huden enligt behandlande läkares eller klinikens anvisning. Huden ska vara ren och torr när elektroden appliceras.

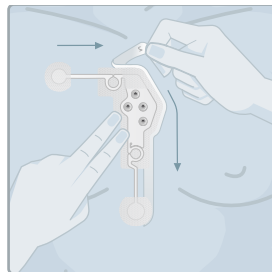

5.

När elektrodens första del sitter bra, ta bort skyddsfilm (nummer 2) och fäst den återstående delen av elektroden på huden.

2. Kontrollera att elektrodförpackningen är öppen och att datumet är giltigt. Öppna påsen och ta ut elektroden.





6.

Kontrollera att det inte finns skador på Faros-enheten och OmegaSnap-adaptorn\*. Koppla Faros-enheten till adaptorn. Fäst adaptorn på elektroden. Tryck adaptorn mot elektroden för att försäkra dig om att alla tryckknappar är knäppta.





8.

När du vill avsluta mätningen, tryck på mittenknappen i cirka 8 sekunder tills du hör tre pip och det blinkande signalljuset slocknar.

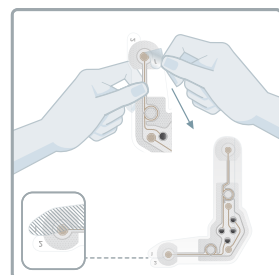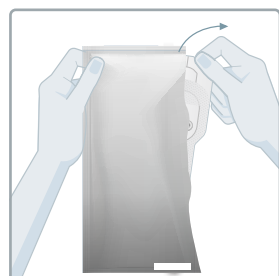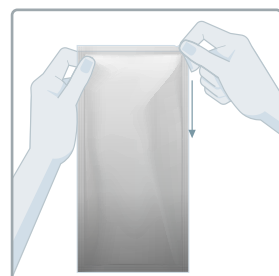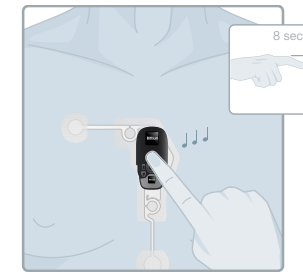


3.

Ta loss skyddsfilm från den självhäftande ytan (nummer 1). Vidrör inte den självhäftande delen.

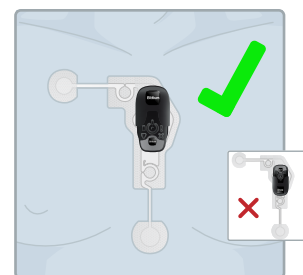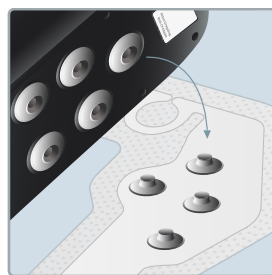


4.

Fäst elektroden på ett avstånd nedanför halsgropen som motsvarar bredden av två fingrar. Elektrodens övre del ska sitta nedanför nyckelbenet och den nedre delen ovanför mellangärdet. Vänta med att ta bort skyddsfilm nummer 2 och 3.


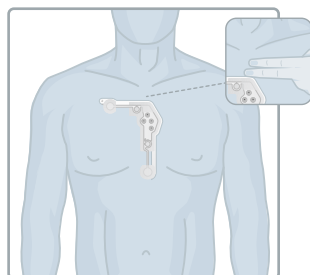


7.

Tryck kort på mittenknappen för att starta mätningen. En signalton och ett blinkande grönt ljus indikerar att mätningen har börjat.

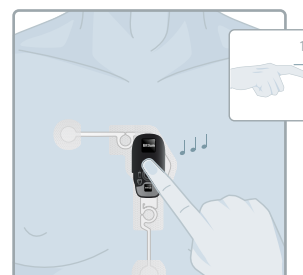

9. Koppla loss enheten och adaptorn från elektroden. Ta bort elektroden från huden genom att ta tag i den självhäftande ytans kant och försiktigt dra neråt tills hela elektroden lossnar. Använd tvålatten vid behov. Släng elektroden efter användning. Lämna tillbaka Faros-enheten och adaptorn till den behandlande läkaren eller kliniken.

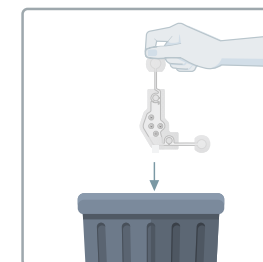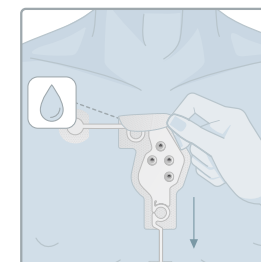

## Symboler

CE CE-märkning

Engångsartikel

Tillverkningsdatum

LOT Batchkod

Tillverkare

Utgångsdatum

Följ bruksanvisningen

MDI Medicinsk produkt