


Tillbehör

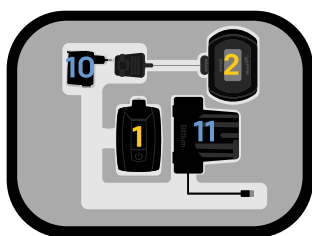

3

4

5

6

7

8

Tillbehör som behövs för registreringen:

- | | |
|---|--|
| 1. Bittium Respiro™ | 6. Respiro™ monteringsplatta för 2 RIP-bälten och reservmonteringsplatta |
| 2. Pulsoximeter | 7. Respiro™ EKG-adapter |
| 3. Snabbguiden/Anmärkningar och Varningar | 8. Bittium OmegaSnap™ 1-CH EKG-elektrod |
| 4. Näskanyl | 9. Medicinsk tejp |
| 5. Två RIP-bälten | |


Använd inte en trasig apparat eller elektroder/näskanyl vars skyddsförpackning har öppnats.


Tillbehör som behövs för att ladda Respiro (vid behov):

- 10. Laddare
- 11. Laddningsdocka


Hur du startar registreringen

Vid behov kan du ta bort överflödigt hår med en rakhyvel eller en rakapparat. Rengör huden enligt behandlingspersonalens anvisningar. Huden ska vara ren och torr när elektroden appliceras.

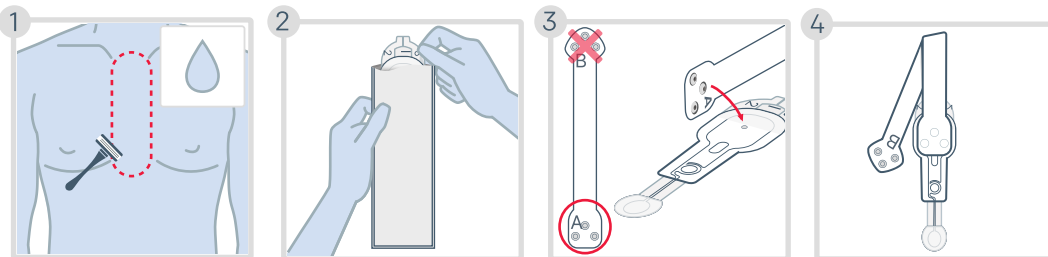


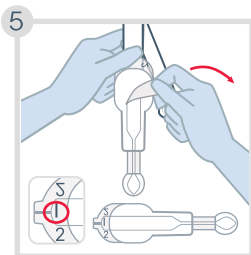


Ta bort skyddsrem-sorna som är märkta med 1.

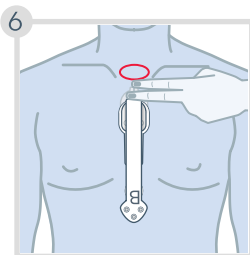

Placera elektrodens överdel ungefär två fingerbredder under bröstbenets halsöppning.

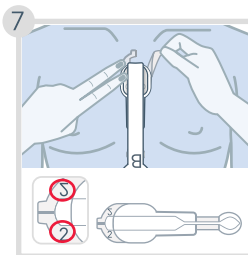


Ta bort skyddsrem-sorna märkta med 2 en efter en från sidorna, och försäkra dig om att elektroden sitter fast på huden.

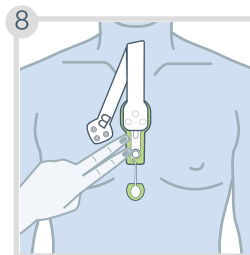

Tryck på elektrodens båda kanter för att försäkra en säker fästsättning.








Ta på dig tröjan.

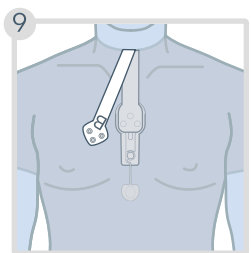

Ta den ena änden av adaptern och trä den genom skjortans halsringning enligt bilden.



Sätt fast apparaten på adaptern och RIP-bältet på monteringsplattan enligt bilden 10-16. Placera RIP-bältena över skjortan.

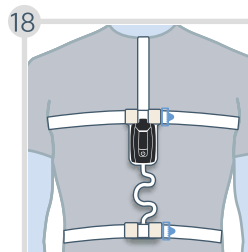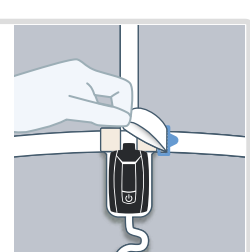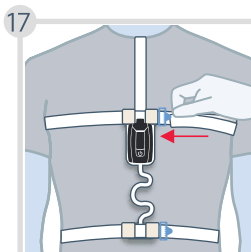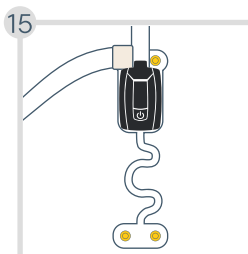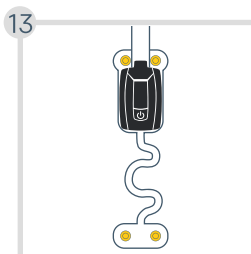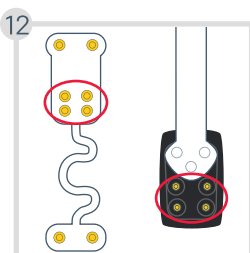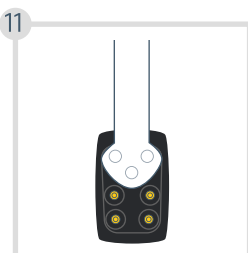


Se till att bältena inte korsar varandra.

Ett bälte över bröstet och ett över magen.


Justera bältena om de är för lösa.

19

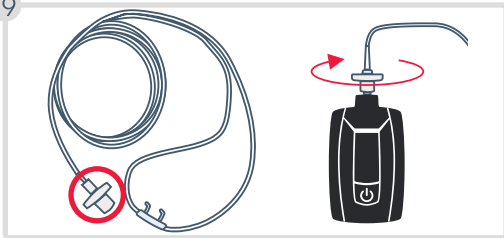


Anslut näskanylen till registreringsanordningen och vrid kontakten en aning medurs tills den går i lås.

20

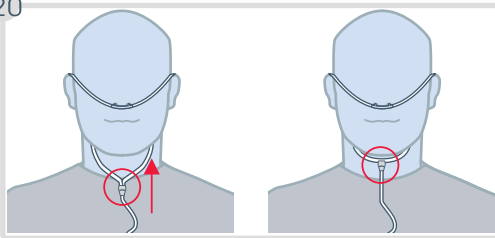


- Flytta spännaren uppåt längs kanylen för att justera passformen.
- **Risk för kvävning!** För försiktigt in kanylen i näsan enligt bilderna.
- Om kanylen har ett munstycke ska det peka mot munnen.

21

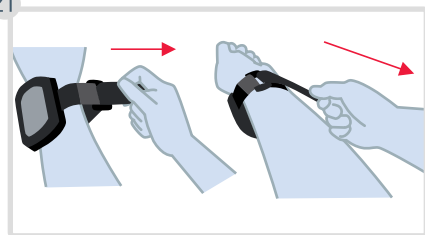


22

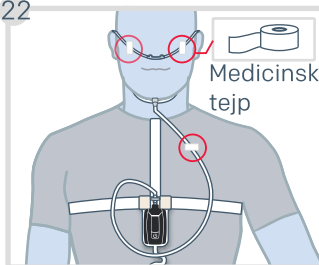


Risk för kvävning! Använd tejp för att fästa näskanylen!

23

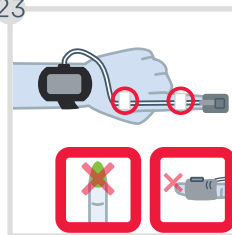


24

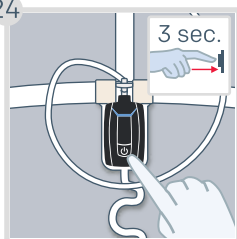

Om inspelningen är inställd på att starta automatiskt, hoppa över steg 24 och 25.


Tryck på strömbrytaren i cirka 3 sekunder tills LED-lamporna lyser blått.

25

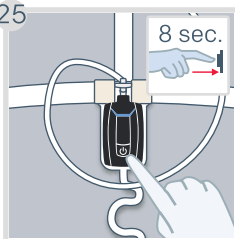

Tryck på strömbrytaren igen i cirka 8 sekunder tills enheten vibrerar en gång och LED-lamporna börjar blinka blått.


26

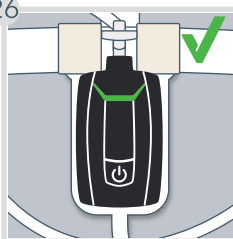

LED-lamporna lyser **grönt** ett ögonblick när registreringen framgångsrikt har påbörjats.

Lamporna släcks automatiskt efter cirka 30 sekunder om allt är OK och du ligger ner.


27

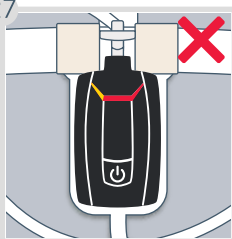

Om en enda LED-lampa blinkar **rött** eller **gult**, kontrollera att den del som motsvarar indikatorlampen är korrekt ansluten.

Förklaringar till indikatorlamporna finns på **nästa sida**.

Under registreringen

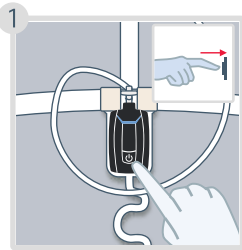


Du kan trycka kort på strömknappen för att markera väckningstidpunkter, t.ex. när du går till sängs, går på toaletten, vaknar o.s.v. (valfritt)

Sluta registreringen


Om inspelningen är inställd på att avslutas automatiskt, hoppa över steg 1.

Tryck på strömbrytaren i cirka 3 sekunder tills enheten vibrerar 3 gånger och enhetens LED-lampor lyser blått, en efter en från vänster till höger.

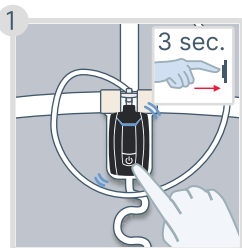


Pulsoximetern stängs av automatiskt.

Enhetens indikatorlampor kommer att vara blåa i 5 minuter, men du kan fortsätta till nästa steg.

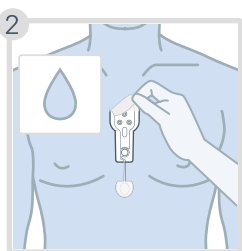

Koppla loss enheten och alla tillbehör från dig själv. Du kan väl använda mildt tvålsvatten vid behov för att ta bort elektroderna från huden.

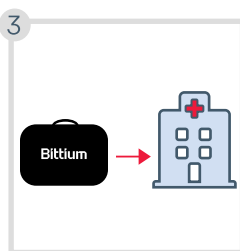

Lägg tillbaka alla dina tillbehör i transportväskan och lämna tillbaka den till din klinik.

LED-indikatorlampor: Respiro sedd från framsidan

Om en enda av LED-lamporna blinkar rött eller gult, kontrollera att den del som motsvarar lysdioden är korrekt ansluten. LED-lamporna lyser grönt när anslutningarna är korrekta. Det finns två mönster av blinkande lampor och de visas i registreringsenheten en efter en. Kontakta din vårdpersonal om LED-lamporna blir helt röda eller inte tänds alls.

Figur 1

Pulsoximeter



Näskanyl



Figur 2

RIP-bälten



EKG-elektrod

 Fel i anslutningen Fingret är inte i pulsoximeterns fingersensor OK

Exempel

Pulsoximeter:
Fingret är inte i pulsoximeterns fingersensor



Näskanyl: OK



RIP-bälten: OK

EKG-elektrod: Fel i anslutningen

Byt ut monteringsplattan om den röda lampan för RIP-fel fortsätter att lysa

Anslut laddningsstationen och laddaren till strömuttaget och placera Respiro i laddningsstationen för att se batteriladdningsnivån. LED-lamporna visar batteriladdningsnivån för enheten. Batteriet är tillräckligt laddat om minst två gröna lysdioder blinkar eller om alla lysdioder lyser kontinuerligt.

Bittium Respiro HSAT™

Monteras och distribueras för



Bittium Biosignals Ltd

Pioneerinkatu 6

70800 Kuopio

Finland

evismo AG

Schweighofstrasse 409

8055 Zürich

Switzerland

Bittium